



## LOFTEX-WIPES (Recharge de 115 lingettes sèches)


### UTILISATION

Nettoyage/désinfection sûr et hygiénique d'objets et de surfaces résistants aux taches dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les cabinets médicaux, les laboratoires, les cuisines, les sanitaires et dans l'industrie pharmaceutique et alimentaire.

De plus, le matériau de la LOFTEX®-WIPES DESi-Box est constitué de fibres qui ne consomment pas l'agent actif du désinfectant tout en offrant une performance de surface efficace.

100 % fibre PET, rouleau non tissé, faible peluchage

- Utilisation complète et efficace du désinfectant
- Prévention de la contamination croisée
- Adsorption minimale par rapport aux qualités de tissu non tissé
- Mouillage idéal de la surface de désinfection
- Résultats de désinfection et de nettoyage plus efficaces grâce à la structure perforée par rapport aux surfaces plates en tissu non tissé
- Fermeture sécurisée des lingettes humides à travers le couvercle de la DESi-Box
- Rouleaux de lingettes perforés déjà placés dans les distributeurs
- Étiquette de lot imprimée pour l'étiquetage du système de distribution de lingettes
- Utilisez le système distributeur pour la désinfection des surfaces dans les zones avec / sans risque d'infection et dans les zones à risque particulier d'infection (jetable)
- Rapport d'efficacité indépendant, plus de 28 jours de durée de vie avec LOFTEX®-Wipes dans un système de distribution de lingettes disponible sur demande
- Incl. Test à 4 champs, phase 2, niveau 2 selon les exigences de la norme DIN EN 16615 : 2015 stabilité microbiologique selon EuAB 2008, chapitre 5.1.3

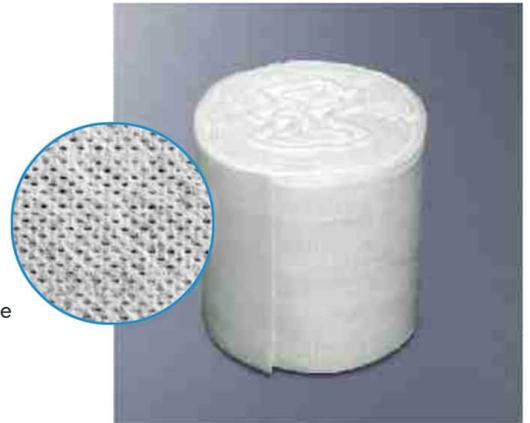

**REFERENCE ARTICLE**  
**M281240115**

### INSTRUCTIONS

1. Portez des gants et désinfectez la surface de travail.
2. Ouvrir le bouchon et verser sur les LOFTEX® WIPES 2,0-2,5 litres de solution prête à l'emploi, du centre vers l'extérieur.
3. Tirez LOFTEX®-WIPES à travers le tissu humide et jetez la première lingette.
4. Bien refermer le LOFTEX®-WIPES DESi-Box.
5. Étiquetez l'étiquette de lot avec un stylo étanche. Après env. 20 minutes, les LOFTEX®-WIPES sont complètement imbibés et prêts à l'emploi.
6. Après trempage, les LOFTEX®-WIPES peuvent être utilisées pendant 28 jours. Ne convient pas à la désinfection des dispositifs médicaux invasifs. Lisez attentivement les instructions ci-jointes. N'utilisez pas de serviettes sèches.
7. Les lingettes LOFTEX®-WIPES éliminent correctement les résidus de produit et les chiffons après la fin de leur durée de vie. Ne convient pas au retraitement.

### INSTRUCTIONS SPECIALES

Retirez les contaminants visibles avant de désinfecter. Essuyer soigneusement la surface d'application avec les LOFTEX®-WIPES pré-imprégnés et assurer un mouillage complet.

Ne pas utiliser de lingettes LOFTEX® séchées. Refermer le couvercle de la boîte DESi après chaque démontage. Les temps d'exposition, la concentration d'application et les instructions spéciales sont indiqués sur le désinfectant. Rapport d'efficacité disponible sur demande.



**Hypros**

Pont-du-Centenaire 144 - 1228 Plan-les-Ouates  
022 338 35 00 - [hypros@hypros.com](mailto:hypros@hypros.com) - [www.hypros.com](http://www.hypros.com)