


PHAGO'SPRAY DM (Bidon 5 lt)

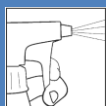

Nettoyant désinfectant

PROPRIETES

Nettoyant désinfectant hydroalcoolique pour la désinfection des surfaces.

Prêt à l'emploi, il a un large spectre désinfectant.

Buse deux positions et ergo amovible pour utilisation en mousse ou spray avec le vaporisateur.

DOMAINE D'UTILISATION

- Le PHAGO'SPRAY DM est un nettoyant désinfectant professionnel pour la désinfection des surfaces dans les environnements à risque.
- Le PHAGO'SPRAY DM peut être utilisé en pulvérisation sur les murs, les plafonds et le mobilier des services de soins et de chirurgie.
- Le PHAGO'SPRAY DM peut aussi être utilisé en application sur un chiffon à usage unique pour la désinfection rapide du petit mobilier, des chariots, des surfaces extérieures des dispositifs médicaux non invasifs et des petites surfaces proche du malade.

COMPOSITION

Substances actives : Ethanol (N° CAS : 64-17-5) : 24% m/m / Chlorure de didécyldiméthylammonium (N° CAS : 7173-51-5) : 0,14% m/m / Alkylamine (N° CAS : 2372-82-9) : 0,25% m/m.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : liquide limpide

Couleur : incolore

Odeur : pamplemousse

pH à 20°C (produit pur) : 9,5 à 11

Masse volumique à 20°C (g/ml) : 0,968 ± 0,005

MODE D'EMPLOI

- Le PHAGO'SPRAY DM est prêt à l'emploi
 - Pulvériser sur un chiffon et/ou appliquer sur la surface à désinfecter. Ne pas rincer*
 - Laisser agir selon tableau ci-contre
- * Dans le cas de désinfection de surfaces pouvant entrer en contact direct avec les denrées alimentaires, un rinçage à l'eau potable est nécessaire.

RECOMMANDATIONS :

- Eviter de faire ruisseler le produit
- Ne pas utiliser en machines de désinfection terminale. Utiliser en sprayer.
- Péréemption : 3 ans à partir de la date de fabrication

REFERENCE : P604140000

Existe aussi en format vaporisateur 750 ml



Activité antimicrobienne

Normes	Concentration	Temps
BACTERICIDE		
EN 1040 (<i>P. aeruginosa</i> et <i>S. aureus</i>)	0,5 %	1 min.
EN 1276 cond. propreté (<i>E. coli</i> , <i>E. hirae</i> , <i>P. aeruginosa</i> et <i>S. aureus</i>)	80 %	15 min.
EN 13697 cond. propreté (<i>E. coli</i> , <i>E. hirae</i> , <i>P. aeruginosa</i> et <i>S. aureus</i>)	100 %	5 min.
EN 13697 cond. saleté (<i>S. typhimurium</i>)	10 %	5 min.
EN 13727 cond. saleté (<i>E. hirae</i> , <i>S. aureus</i> et <i>P. aeruginosa</i>)	50 %	5 min.
FONGICIDE		
EN 1275 (<i>C. albicans</i>)	2,5 %	15 min.
EN 13697 cond. saleté (<i>C. albicans</i>)	20 %	15 min.
EN 13624 cond. saleté (<i>C. albicans</i>)	20 %	5 min.
MYCOBACTERICIDE		
EN 14348 cond. propreté (<i>M. avium</i>)	50 %	15 min.
VIRUCIDE		
EN 14476 (Rotavirus)	90 %	5 min.
HIV1	100 %	1 min.
HBV	0,25 %	10 min.
EN 14476 (Influenza A/H1N1)	80 %	30 s.

Utiliser les biocides avec précaution.

Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

pH 0 7 10 14



Communiquant Suisse :

Christeys GmbH
Baarerstrasse 95
6302 Zug

N° autorisation OFSP : CHZN5377
CPID : 622863-20

Distributeur Suisse :

HYPROS SA
Pont-du-Centenaire 144
CH - 1228 Plan-les-Ouates
Tél. 0 22 3 38 35 0 0
Fax. 0 22 3 38 35 0 1
hypros@hypros.com

